

GLUTAMAX 2%

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

GLUTAMAX 2%, é um desinfetante hospitalar pronto uso de alto nível para artigos semi-críticos, equipamentos, dispositivos médico-cirúrgicos, endoscópios e materiais termossensíveis.

CARACTERÍSTICAS

É um desinfetante químico, a frio de ação rápida e eficiente para área odontológica, laboratorial e hospitalar. Possui eficácia garantida e comprovada contra *Trichophyton mentagrophytes*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis*, *Candida albicans*. Esporos: *Clostridium sporogenes* e *Bacillus subtilis*. Micobactérias: *Mycobacterium massiliense*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium smegmatis*, *Mycobacterium avium* e *Mycobacterium terrae*.

COMPOSIÇÃO

Glutaraldeído 2%, emulsificante, alcalinizante e veículo.

MODO DE USAR

PRODUTO PRONTO PARA O USO. Não diluir! Não necessita de ativador!

1) Lavar, enxaguar e secar completamente todo o artigo/ instrumental/ equipamento.

2) Imergi-los completamente em um recipiente com a solução de Glutamax 2% e deixá-los em contato por 10 minutos.

3) Ao retirar os artigos, utilize luvas e pinças esterilizadas.

4) Enxaguar os artigos cuidadosamente com água estéril, secando-os com gaze ou compressa estéreis.

ATENÇÃO: A validade da solução é de 30 dias. Verificar regularmente a atividade do produto com as fitas teste fornecidas pelo fabricante. Após os 30 dias ou quando a concentração do glutaraldeído ficar abaixo de 2%, trocar imediatamente a solução de uso. Lavar, desinfetar e secar os recipientes de imersão e remover os resíduos da cuba de imersão quando necessário.

DOSAGEM / FITA TESTE

Para não contaminar a unidade onde está ocorrendo a desinfecção, colocar luvas de procedimentos antes de mergulhar a fita na cuba de imersão. Após colocar as luvas, mergulhar a fita na solução de Glutamax 2% por 2 segundos, logo em seguida, retirar a fita e eliminar com cuidado o excesso da solução, que pode dificultar a visualização do resultado. Aguardar por 120 segundos e comparar a cor que aparecer na fita com as cores que aparecem na escala de cores do frasco, que determinam os níveis de Glutaraldeído na solução.

GLUTAMAX 2%

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

MÉTODO DE INATIVAÇÃO E DESCARTE DO PRODUTO:

Frasco de 1 Litro: Verter 46 gramas de Meta-bissulfito de sódio em 1 litro de Glutamax 2% Pronto Uso para inativá-lo, aguardar 5 minutos e descartar diretamente na rede de esgoto.

Galão de 5 Litros: Verter 230 gramas de Meta-bissulfito de sódio em 5 litros de Glutamax 2% Pronto Uso para inativá-lo, aguardar 5 minutos e descartar diretamente na rede de esgoto.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Solução	Especificação
pH	Concentrado	5,20 a 6,20
Densidade	Concentrado	1,000 a 1,010 g/mL
Aparência	Concentrado	Líquido Incolor
Odor	Concentrado	Característico

EMBALAGENS / RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro.

Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros.

RISCOS

Como todos os produtos deste tipo, o Glutamax 2% quando puro pode irritar as vias respiratórias e pode causar queimaduras na pele e olhos.

SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's. O contato direto e/ou prolongado pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Em caso de irritação lave o local com água em abundância, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110.

RESTRIÇÕES DE USO

Não misturar o Glutamax 2% a outros produtos químicos eles podem prejudicar seu desempenho.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

GLUTAMAX 2%

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos que saem da Cosmoderma estão sempre acompanhados por seus laudos de qualidade físico-químicos.

LEGISLAÇÃO

- Produto risco II

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº 3.4628.0045.

Categoria: Desinfetante

- Informações de rótulos:

RDC Nº 14, de 28 de fevereiro de 2007.

RDC Nº 59, de 17 de dezembro de 2010.